


Q.E. Lightspeed 5.X

1° EDIZIONE:	18-11-2003	5° AGGIORNAMENTO:	
1° AGGIORNAMENTO :	11-02-2004	6° AGGIORNAMENTO:	
2° AGGIORNAMENTO :		7° AGGIORNAMENTO:	
3° AGGIORNAMENTO :		8° AGGIORNAMENTO:	
4° AGGIORNAMENTO :		9° AGGIORNAMENTO:	
MATRICOLA N° :	R000475	N° DISEGNO CLIENTE :	R000475
		RICEVUTO IL:	01 FOGLIO DI 9

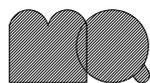




MULTIQUADRI S.R.L.

Via G.Carducci n.221
20099 Sesto San Giovanni - Milano -
tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472
e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it

G.E. Medical Systems Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi n.280/B 20126 Milano

ARMADIO TURATI IS RAL 9010 IP40 Dim. 1900 x 600 x 450 mm

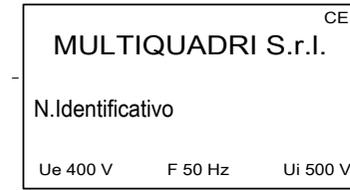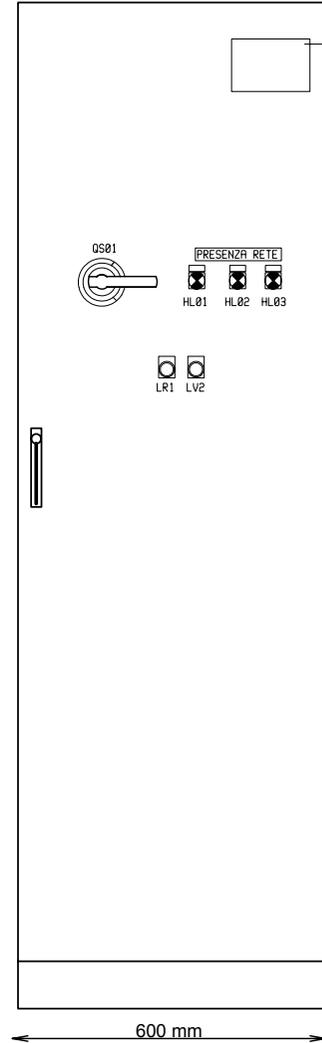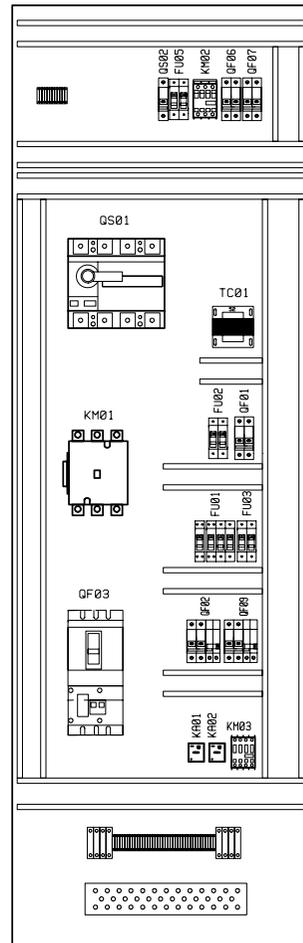

G.E. Medical Systems Italia S.p.A. viale Fulvio Testi n.280/B 20126 Milano

n.Disegno cliente: R000475

n. Matricola: R000475

Data: 11-02-2004

MULTIQUADRI

Via G. Carducci n.221
20099 Sesto S. Giovanni - Milano -
tel. 02/24.21.750 f.a.
fax 02/24.01.472
S.R.L. e-mail: ufficiotecnico@multiquadri.it


Nome Quadro: Q.E. Lightspeed 5.X

Disegnatore: A.B.

02 foglio di 9

SPEGNIMENTO
LIGHTSPEED 5.X

ACCENSIONE
LIGHTSPEED 5.X

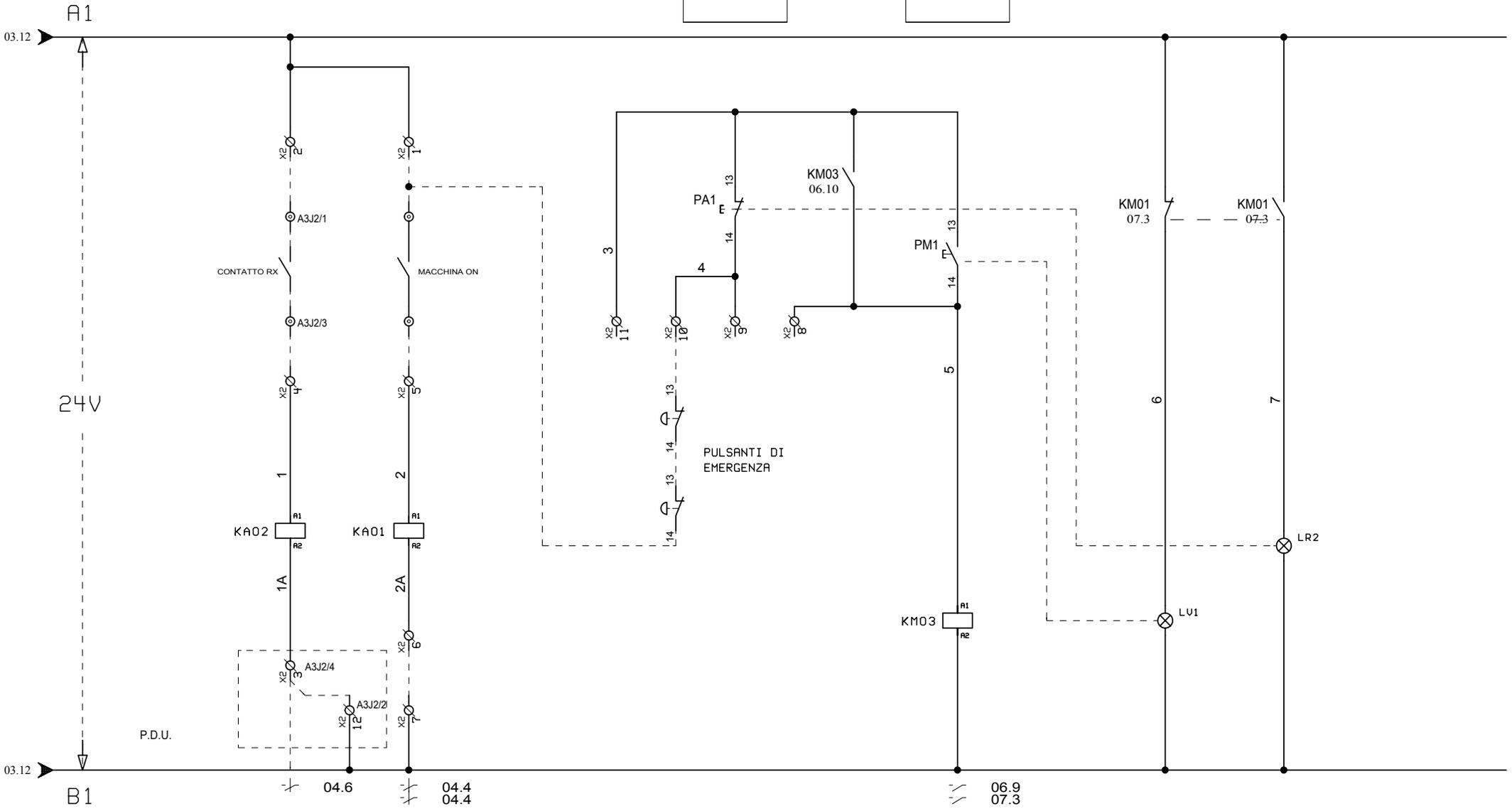




KA01/KA02 = RELE' TIPO FINDER OCTAL 60.12 24V-AC
 KM03 = TIPO CGE RL4RA022TD 24V
 PA1= PULSANTI LUMINOSO ROSSO CEMA P9MPLRGA
 PM1 = PULSANTE LUMINOSO VERDE CEMA P9MPLVGD
 SPIE ROSSE TIPO CEMA P9MLRD + P9PTNVN

G.E. Medical Systems Italia S.p.A. viale Fulvio Testi n.280/B 20126 Milano

n.Disegno cliente: R000475
 FDO:

n. Matricola: R000475

Data: 11-02-2004

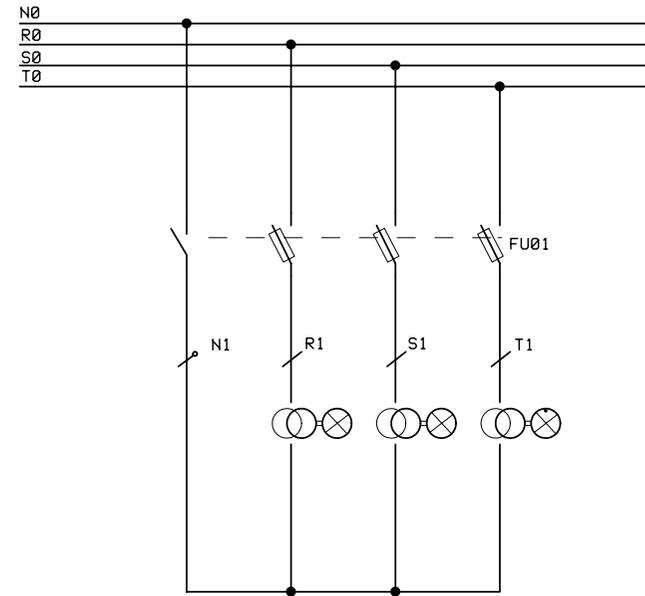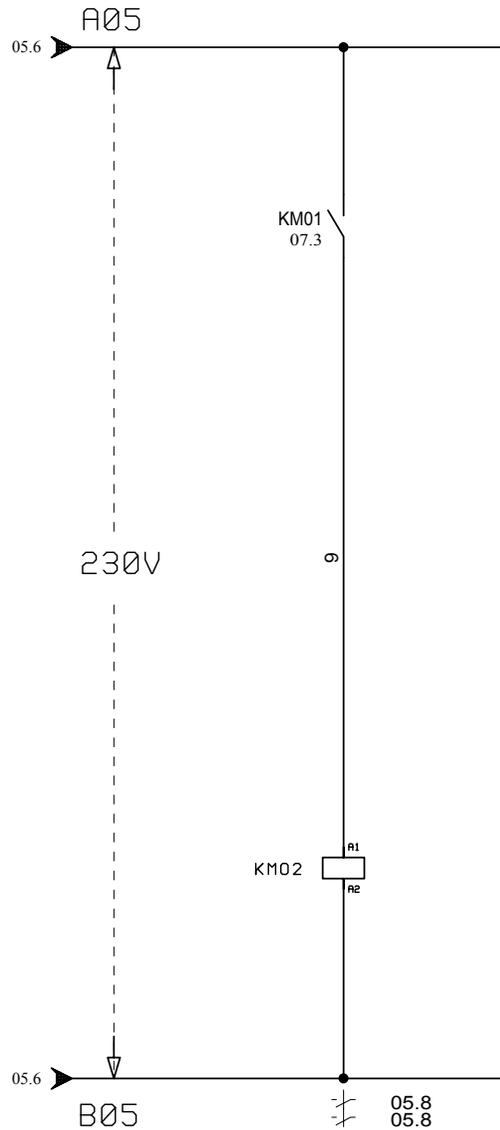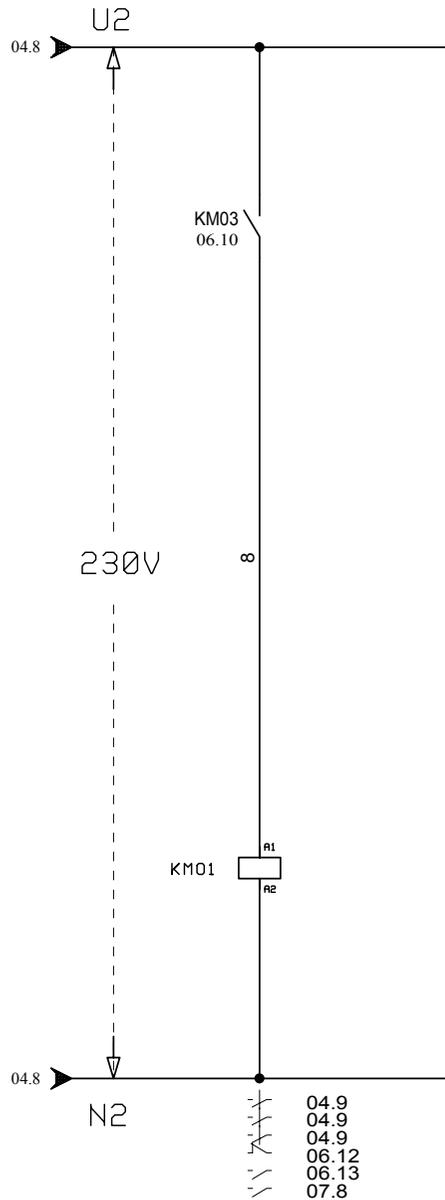

G.E. Medical Systems Italia S.p.A. viale Fulvio Testi n.280/B 20126 Milano

MULTIQUADRI
 Via G. Carducci n.221
 20099 Sesto S. Giovanni - Milano -
 tel. 02/24.21.750 r.a.
 fax 02/24.01.472
 S.R.L. e-mail: ufficiotecnico@multiquadri.it

n.Disegno cliente: R000475

FDO:

n. Matricola: R000475

Data: 11-02-2004

Nome Quadro: Q.E. Lightspeed 5.X

Disegnatore: A.B.

07 foglio di 9

MORSETTIERA DESTINAZIONE		CAVO		MORSETTIERA QUADRO ELETTRICO POTENZA						
APPARECCHIATURA	NUMERO MORSETTO	NUMERO MORSETTO	TIPO MORSETTO WEIDMULLER	NUMERO FILO	APPARECCHIATURA	PAGINA				
GENERALE MACCHINA		R	⓪ SAK 95	R	QS01	03				
		S	⓪ SAK 95	S						
		T	⓪ SAK 95	T						
		N	⓪ SAK 95	N						
SCORTA		40	⓪ SAK 4	49	QF09	03				
		41	⓪ SAK 4	49						
SEGNALAZ. APPAR. IN FUNZIONE L1-L1N		12	⓪ SAK 4	V5	QF02	04				
		10	⓪ SAK 4	N5						
SEGNALAZ. PASS. RX L2-L2N		13	⓪ SAK 4	20	KA02	04				
		11	⓪ SAK 4	21						
ARMADIO PDU		21	⓪ SAK 70	U7	QF03	04				
		22	⓪ SAK 70	V7						
		23	⓪ SAK 70	H7						
GENERALE UTENZE SOTTO TRAF0		1	⓪ SAK 6	A	QS02	05				
		2	⓪ SAK 6	B						
CIRCUITO INIETTORE PR1		3	⓪ SAK 4	A3	QF06	05				
		4	⓪ SAK 4	B3						
CIRCUITO INIETTORE PR2		5	⓪ SAK 4	A4	QF07	05				
		6	⓪ SAK 4	B4						

Via G. Carducci n.221
 20099 Sesto S. Giovanni - Milano -
 tel. 02/24.21.750 f.a.
 fax 02/24.01.472
 S.R.L. e-mail: ufficiotecnico@multiquadri.it

